


Die ersten Schritte mit Vivatmo pro



- ① Handmessgerät
- ② Ladestation
- ③ An-/Aus-Schalter
- ④ Touchscreen
- ⑤ Netzteilanschluss

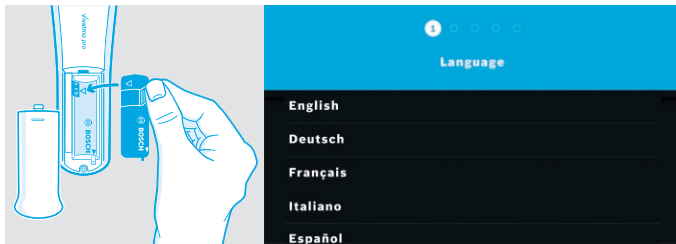

- Legen Sie den Akku ins Akkufach auf der Rückseite des Handgeräts.
- Verbinden Sie die Basisstation über das Netzteil mit der Stromversorgung.
- Ziehen Sie die Schutzkappe des Handgeräts ab und legen Sie das Handgerät für einige Stunden in die Ladestation.
- Drücken Sie den An-/Aus-Schalter der Basisstation.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Vivatmo pro in Betrieb zu nehmen.



Bitte beachten Sie vor dem ersten Gebrauch des Vivatmo pro die folgenden Hinweise:

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch gründlich durch. Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung.

Prüfen Sie vor jeder Nutzung Basisstation, Handmessgerät, Einweg-Mundstück sowie dessen Verpackung. Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht, sollten Sie eine Beschädigung daran feststellen.



Bosch Healthcare Solutions GmbH
Stuttgarter Str. 130
D-71332 Waiblingen



F09G 100423_01
Letzte Änderung: 2019-05-24



www.vivatmo.com

Nicht für den kommerziellen Verkauf in den USA verfügbar.

Kurzanleitung

vivatmo
pro


Vivatmo pro - Bildschirm



- ① Aufträge: Messaufträge aus der elektronischen Patientenakte
- ② Verwalten: Übersichtsliste zu Patienten, Messungen und Aufträgen
- ③ Ladezustand des Handmessgeräts
- ④ Status der Verbindung zum Handmessgerät
- ⑤ Messen: Starten der Messung
- ⑥ Einstellungsmenü/Logout


Vivatmo pro mobil verwenden

Das Handmessgerät ist auch ohne die Basisstation mobil einsetzbar, wenn die Basisstation außer Reichweite oder ausgeschaltet ist.

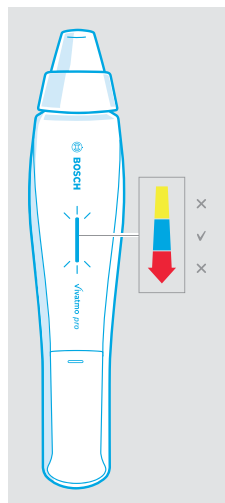

1. Schalten Sie das Handmessgerät ein. Stecken Sie ein neues Mundstück fest auf.
2. Drücken Sie die Enter-Taste und warten Sie die Regenerationszeit ab.
3. Wenn das Ausatmen-Symbol erscheint, kann die Messung beginnen.
4. Die LED auf der Geräteoberseite zeigt die Atemstärke an:
 - Gelb: zu schwach
 - Blau: richtig
 - Rot: zu stark
5. Nach Durchführung der Messung erscheint das Ergebnis unmittelbar auf dem Display.

Eine Messung mit Vivatmo pro durchführen

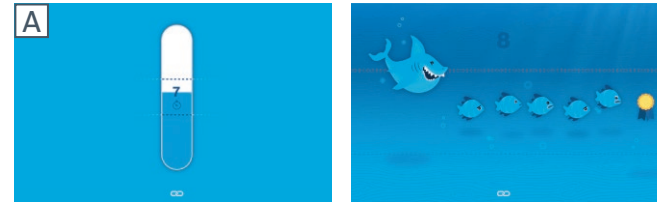


Animation Skala

Animation Fische

A Vorbereitung:

1. Schalten Sie das Handmessgerät ein.
2. Tippen Sie auf die Messen-Taste auf dem Hauptbildschirm und stecken Sie ein Mundstück fest auf.
3. Wählen Sie eine Animation und warten Sie die Regenerationszeit ab.

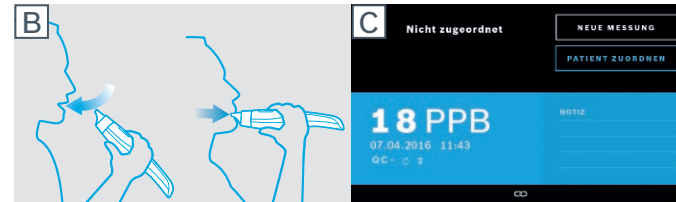


B Messung:

Der Patient sollte entspannt sitzen und tief durch den Mund einatmen, das Handgerät zum Mund führen und durch das Mundstück kontrolliert ausatmen. Die Atemstärke ist korrekt, wenn sich der Balken bzw. Hai zwischen den beiden gestrichelten Linien befindet. Die verbleibende Zeit wird während der Messung angezeigt.

C Ergebnis:

Nach Durchführung der Messung erscheint das Ergebnis unmittelbar auf dem Bildschirm.

Messungen mit Vivatmo pro verwalten

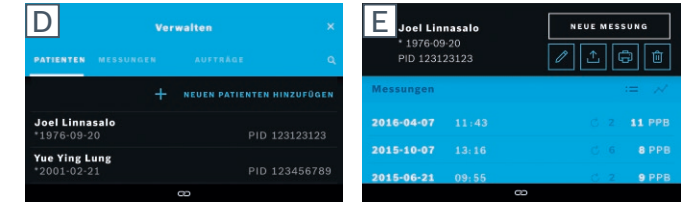

D Verwalten:


Im **Verwalten**-Menü können Sie Patientenordner, Messungen und Aufträge verwalten.

Patient hinzufügen: Wählen Sie im **Patienten**-Reiter **+Neuen Patienten hinzufügen** aus.

Patient suchen: Tippen Sie auf das Lupen-Symbol und geben Sie Name oder Patienten-ID ein.

E Patientenordner:

Im Patientenordner sehen Sie alle wichtigen Infos zum Patienten. Sie können sie bearbeiten, drucken, exportieren, löschen oder eine neue Messung starten.

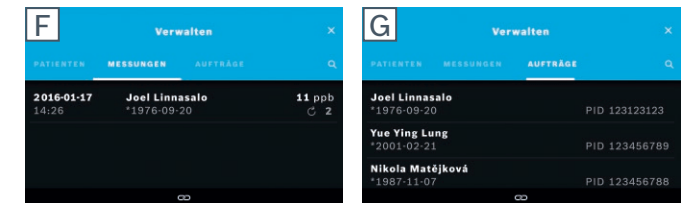

F Messungen:

Hier können Sie einzelne Messungen aufrufen und nicht zugeordnete Messungen einem Patienten zuweisen.

G Aufträge:

Hier sehen Sie alle aktuellen Aufträge, die Sie über das Patientenmanagementsystem Ihrer Praxis an das Gerät gesendet haben.