



Die ersten Schritte mit Vivatmo pro

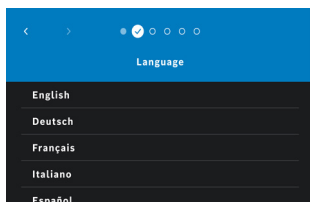

- ① Handgerät
- ② Ladestation
- ③ Ein-/Aus-Taste
- ④ Touchscreen
- ⑤ Netzteilanschluss

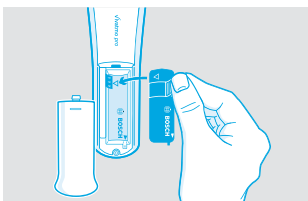

1. Legen Sie den wiederaufladbaren Akku vorsichtig in das Batteriefach des Handgeräts ein.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Die Basisstation startet automatisch.
3. Entfernen Sie die Schutzkappe und legen Sie das Handgerät zum Laden auf die Ladestation.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm der Basisstation.



Bitte beachten Sie vor dem ersten Gebrauch des Vivatmo pro die folgenden Hinweise:

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch gründlich durch. Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung.

Prüfen Sie vor der Nutzung die Basisstation, das Handmessgerät, das Einweg-Mundstück sowie dessen Verpackung. Verwenden Sie das Gerät und Zubehör nicht, sollten Sie eine Beschädigung daran feststellen.



vivatmo-hcp.com



Bosch Healthcare Solutions GmbH
Alte Bundesstraße 50
71332 Waiblingen
Deutschland



F09G100424 Rev 3.0
Letzte Änderung: 2025-08-07

Technik fürs Leben



BOSCH




vivatmo
pro
Kurzanleitung

Vivatmo pro – Bildschirm




- ① Messaufträge aus dem elektronischen Patientendatensatz (EPR)
- ② Verwalten: Messungen und Aufträge
- ③ Ladezustand des Handgeräts
- ④ Status der Verbindung zum Handgerät
- ⑤ Messen: Messung starten
- ⑥ Einstellungsmenü/ Logout

FeNO-Messung durchführen

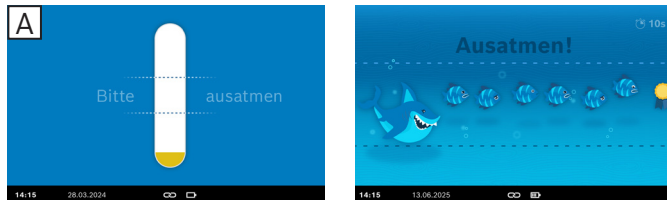

A Vorbereitung:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Handgerät eingeschaltet und mit der Basisstation verbunden ist.
2. Wählen Sie im **Startbildschirm** die Option **MESSEN**.
3. Standardmäßig ist der 10-Sekunden-Messmodus ausgewählt. Für Kinder (7-11 Jahre) kann der verkürzte 6-Sekunden-Messmodus gewählt werden. Drücken Sie auf **WEITER**.
4. Setzen Sie ein Einweg-Mundstück auf das Handgerät auf.
5. Wählen Sie eine Visualisierung aus und warten Sie bis der Regenerationsvorgang abgeschlossen ist.

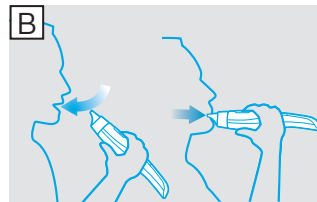

B Messung:


Der Patient sollte in einer aufrechten Position sitzen, tief durch den Mund einatmen, das Handgerät an den Mund heben und durch das Einweg-Mundstück ausatmen. Die Visualisierung hilft dem Patienten, innerhalb der gestrichelten Linien zu bleiben. Auf dem Display ist die verbleibende Zeit bis zum Ende der Messung zu sehen.

C Ergebnis:

Nach Abschluss der Messung wird der Ergebnis-Bildschirm angezeigt. Wenn die Messung fehlgeschlagen ist, wird dies auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die **ENTER**-Taste auf dem Handgerät und wiederholen Sie die Messung.



Messungen verwalten


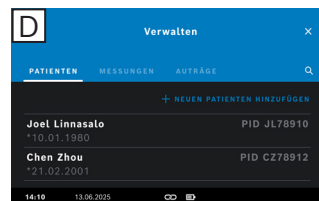


D Verwalten:

Im **Verwaltungsmenü** können Sie Patientenakten, Messungen und Messaufträge verwalten.
Neue Patienten hinzufügen: Wählen Sie im Register **Patienten** die Option '+Neuen Patienten hinzufügen'.
Patienten suchen: Wählen Sie die Schaltfläche **Suchen** und geben Sie den Namen oder die Patienten-ID ein.

E Patientendatein:

In der Patientenliste können Sie die einem Patienten zugeordneten Messungen finden. Sie können Schaltflächen auswählen, um die Patientendaten zu **Bearbeiten**, **Exportieren**, **Drucken** oder **Löschen**, oder um eine **NEUE MESSUNG** zu starten.

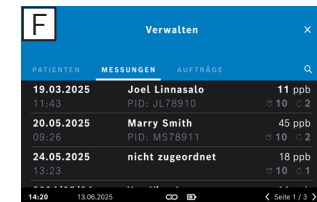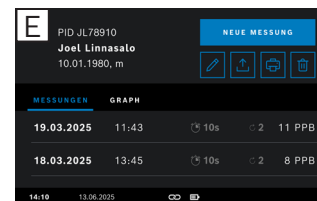

F Messungen:


Hier können Sie einzelne Messungen auswählen und nicht zugewiesene Messungen einem Patienten zuordnen.

G Aufträge:

Hier sehen Sie alle aktuellen Messaufträge, die Sie über das EPR der Praxis an das Gerät gesendet haben.

Standalone Messung mit dem Handgerät

Standalone- Messungen können durchgeführt werden, wenn das Handgerät keine Verbindung zur Basisstation hat, die Basisstation außerhalb der Reichweite oder ausgeschaltet ist.

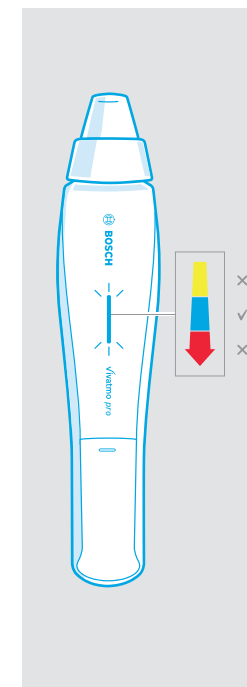

1. Schalten Sie das Handgerät mit der **EIN/AUS-Taste an**. Stecken Sie ein neues Einweg-Mundstück auf.
2. Drücken Sie **ENTER** und warten Sie bis der Regenerationsvorgang abgeschlossen ist.
3. Starten Sie die Messung wenn das Ausatemungs-Symbol angezeigt wird.
4. Die Farbe der **LED** gibt Ihnen Rückmeldung zur Atemstärke:
Gelb: zu schwach
Blau: genau richtig
Rot: zu stark
5. Nach der erfolgreichen Messung wird das Ergebnis angezeigt. Alle Ergebnisse werden automatisch auf dem Handgerät gespeichert und nach dem Auflegen in die Ladeschale mit der Basisstation synchronisiert.